

Procédure téléchargement du logiciel Diasend

Étape 1 : Comment créer un compte patient

Connectez-vous sur www.diasend.com pour créer un compte et cliquez sur le bouton « **Enregistrez-vous ici** ». Cliquez sur le drapeau français.

Enregistrez-vous ici



1 Détails de connexion
Introduisez un nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe de votre choix pour votre compte personnel diasend®. Cliquez sur continuer.

1 Informations d'identification 2 Informations du profil 3 Confirmer l'enregistrement

Informations d'identification
Pour vous enregistrer, suivez ces quelques étapes simples.
* Informations obligatoires
adresse email *
Répétez identifiant de connexion *
Ceci est l'identifiant de connexion que vous utiliserez pour initier une session sur diasend.com.
Mot de passe *

2 Renseignements personnels
Saisissez vos renseignements personnels, puis cliquez sur continuer.

1 Informations d'identification 2 Informations du profil 3 Confirmer l'enregistrement

Informations du profil
* Informations obligatoires
Code postal Ville type de diabète *
Pays *
France *
Courriel de renouvellement de mot de passe *

3 Confirmer l'enregistrement
Cochez la case pour approuver les conditions générales et confirmer l'enregistrement. Cliquez sur continuer.

1 Informations d'identification 2 Informations du profil 3 Confirmer l'enregistrement

Confirmer l'enregistrement
Informations d'identification
Abonnement: Gratuit
Nom d'utilisateur: franski/fransk
Mot de passe: 1*****
Informations du profil
44237 Roda
France

J'approuve les conditions générales de diasend® Personal et j'accepte que Google AB traite mes informations dans la mesure nécessaire pour fournir les services demandés.
 Je ne suis pas un robot

4 Téléchargez puis installez diasend® Uploader
Installez diasend® Uploader sur votre ordinateur personnel en cliquant sur l'icône appropriée Windows ou Mac. Suivez les instructions d'installation qui apparaissent à l'écran.

1 Informations d'identification 2 Informations du profil 3 Confirmer l'enregistrement

Merci
Votre compte diasend® Personal est à présent enregistré.
Pour pouvoir transférer vos données vers votre compte diasend® Personal, vous devez d'abord installer l'utilitaire gratuit diasend® Uploader sur votre ordinateur.

Besoin d'aide ?

Contactez-nous à l'adresse e-mail france@diasend.com ou par téléphone au 0800 909 350

Étape 2 : Comment commencer à télécharger des données vers diasend[®]

1

Démarrez diasend[®] Uploader

Double-cliquez sur l'icône diasend[®] Uploader sur le bureau de votre ordinateur (si vous utilisez un Mac, veuillez accéder au « dossier d'applications » ou à la « plateforme de lancement » pour trouver diasend[®] Uploader).




2

Branchez le câble de l'appareil ou une clé électronique IR

Branchez le câble de votre appareil à un port USB de votre ordinateur.

REMARQUE : pour télécharger des données d'Omnipod[®] PDM sur un ordinateur Mac fabriqué avant 2012 utilisant le système d'exploitation OS X El Capitan, nous vous recommandons d'utiliser un concentrateur USB.

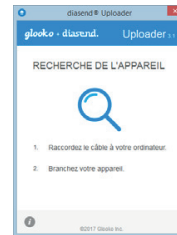


3

Branchez votre appareil au câble

Branchez l'appareil au câble ou placez-le devant une clé électronique IR.

REMARQUE : pour obtenir des instructions spécifiques concernant la façon de télécharger les données de votre appareil, utilisez le guide de démarrage rapide personnel de diasend[®] accessible sur le site support.diasend.com.

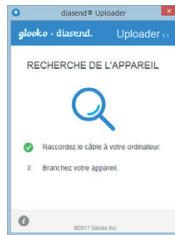

4

Le dispositif commence le téléchargement


Ne débranchez pas votre appareil avant que le processus de téléchargement ne soit terminé.



5

Vérifier le compte pour le premier téléchargement d'un appareil


Saisissez votre nom d'utilisateur (Nom d'utilisateur et mot de passe créé lors de l'enregistrement du compte). Cliquez sur « S'enregistrer ».

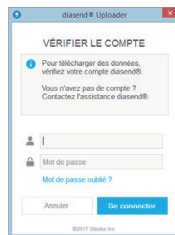



6

Affichez vos données

Connectez-vous sur www.diasend.com pour afficher vos données.

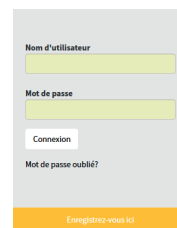

Exemples de rapports et de tableaux

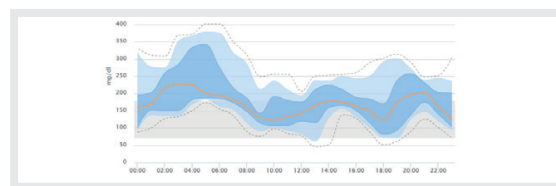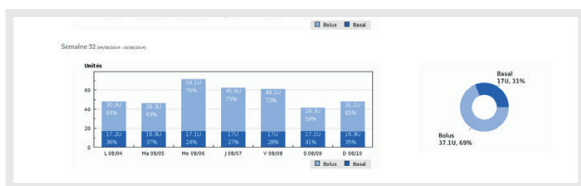

Heure	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00	
00:00	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225

Glycémie	CGM	Insuline	Glucidés	Activité
Moyenne 202 mg/dl	Moyenne 182 mg/dl	Dose quotidienne moyenne 50.1 U	Quantité moyenne de glucidés / jour 114 g	Moy. pas/jour 4047 pas
ET = 64 # n = 64	ET = 74 # n = 3659	ET = 10 # n = 14	ET = 133 # n = 26	Moy. kcal/jour 950 kcal
# moy. / jour = 3.1	# moy. / jour = 265.4	# moy. de doses bolus/jour = 8.4	# moy. / jour = 1.9	40% sur 10000 (objectifs à atteindre)

Document diasend

M0147V6B01 (2018-09-03)